

* * * 腸道細菌検査 * * *

【腸道細菌検測是一项重要的检测办法，用于调查肠道是否存在食物中毒细菌】


1.我们将分发贴着印有名字的标签的采集工具

请不要弄脏塑料包装




2.新人或丢失采集工具的人请使用这个

如果蓝色塑料包装的名字部分又不能识别的字或者没写名字
检验结果将不会记入报告，需重新检查。

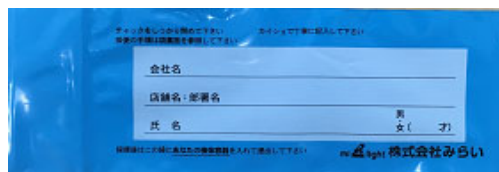

【如何收集样本】

① キャップのはずし方

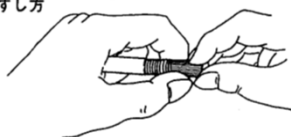

1.慢慢拔出来


② 便のとり方



2.大便表面戳三次，收集0.5g以上

※腹泻的时候也请注意收集同样多的样本量。

③ キャップの差し込み方

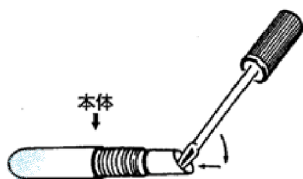


3.从上倾斜插入本体，直到听到【啪唧】声，确定紧闭。

< 注意 >

1. 即使便中混有血液，对细菌检查也没有影响。

2. 收集後1週内發送

3. 請用快遞或郵寄方式發送

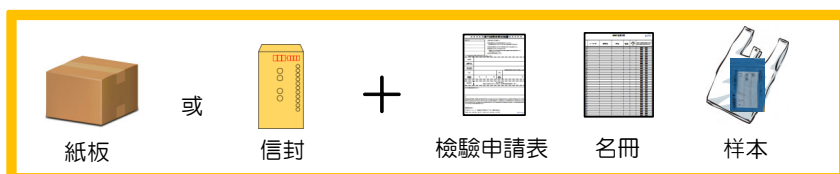

公司名稱

株式会社みらい

地址

〒359 - 1111 埼玉県所沢市緑町2 - 7 - 13

TEL

042-968-4097

FAX

042-968-4098