

採便のしかた

【腸内細菌検査はあなたの腸に食中毒細菌がいるかを調べる為の大事な検査です】

1.お名前を印字したシールを貼り付けて採取キットをお配りします。


外装のビニールは汚したりしないようにお願いします。万が一陽性検体が付着すると食中毒細菌が周りに感染してしまいます。



2.新人の方やキットを無くしてしまった方はこちらを使用して下さい。


お名前は必ず書いてください。

青ビニールのお名前部分に読めない字や未記入がある場合、検査報告書には【氏名なし】という表記で検査報告となりますのでご注意ください。

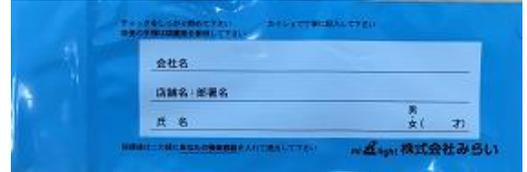

【検体採取（便）】 ※検体ビニール裏面にも採取の仕方が書いてあります


① キャップのはずし方

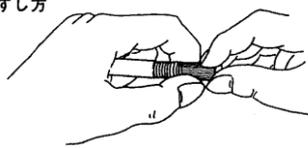

ゆっくりとキャップを引き抜く




② 便のとり方

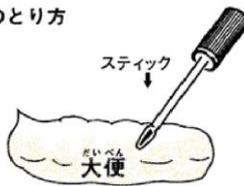

便の表面にスティックの先端部を2～3回つきさし、0.5g以上採取してください

- ◆下痢便のときも同様に採取量を確保してください
- ◆血液が混じていても細菌検査には支障ありません


③ キャップの差し込み方

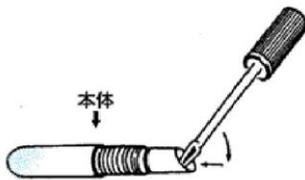

スティックを斜め上より本体に差し込みパチンと音がするまで押し込む

検体が漏れないように採便管と青いビニールのチャックは確実に閉めて下さい

- ◆採便後1週間以内に当検査所までお持ち込み、もしくは送付して下さい

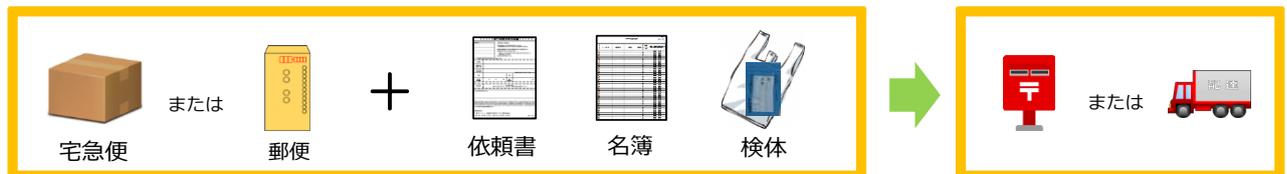

宅配便もしくは郵便にて依頼書と名簿、検体（便）を下記まで送付して下さい

検体送付先 株式会社みらい
住所 〒359-1111 埼玉県所沢市緑町2-7-13
電話番号 042-968-4097
FAX番号 042-968-4098