

# 福祉施設様向け 新型コロナウイルス PCR 検査

「科学で見えないものを見えるようにする会社」



## 株式会社 みらい

株式会社みらいは衛生管理を専門とする検査機関です。  
47 都道府県 2200 法人、21500 店舗と衛生検査のお取引をしています。  
年間に約 60 万件の PCR 検査実施しております！

## 唾液で簡単に PCR 検査

### 申し込み方法



### 採取の仕方

(詳しくは裏面をご覧ください。)

唾液になりますが綿棒で口腔内を拭い、1ml程度の唾液を回収します。  
唾液を出しにくい利用者様でも唾液を採取しやすいようにと採取キットを再設計しました。

# 新型コロナウイルスPCR検査の採取手順について

## キットの内容




①バリアパウチ



②緩衝材



③採取キット(唾液用)

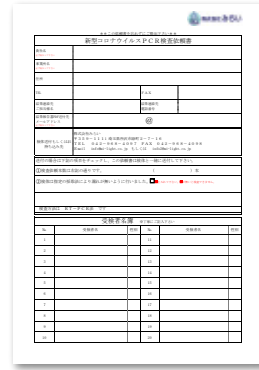

④検査依頼書



⑤補助用綿棒

## 検査実施の手順

- ③採取キット(唾液用)にお名前をマジックかサインペンで書いてください**  
新型コロナウイルス唾液PCR検査申込み書に記載頂いた受検者名を書いて下さい
  - チューブに唾液を1-2ml程度採取して下さい**
    - ③採取キット(唾液用)のキャップを開け、チューブ内に唾液を採取して下さい。
    - ③採取キット(唾液用)の壁面等に唾液が付着しないようにして下さい。付着した場合はアルコール等でふき取して下さい。唾液を採取したらキャップを強く締めて唾液が漏れないようにして下さい。採取の直前は飲食を30分控えて下さい。唾液に血液が混じっても問題ありません。  
※唾液を出しづらい方は付属の綿棒で唾液採取を補助する為にご利用ください。
  - 検査依頼書に必要事項を記入し、梱包をして下さい**
    - ③の採取キット(唾液用)と②の緩衝材を①パウチに入れて下さい。
    - ①パウチの空気を抜いて封をして下さい。  
検査依頼書は集荷担当にパウチ入り検体と一緒に渡して下さい。  
※パウチには1本だけでなく数本入ります。  
※ご依頼の人数に合わせた大きさのパウチを検査容器と一緒に納品します。  
※緩衝材は万が一採取キット(唾液用)から唾液が漏れた際に吸収し、漏洩を防ぐ為の物です。
- ①バリアパウチを密閉して頂ければ唾液が漏れる事はありません、集荷に伺うまで冷蔵庫で保管して下さい。



検体回収及び検査機関お問い合わせ先



株式会社 **みらい**

〒359-1111 埼玉県所沢市緑町2-7-16

TEL: 042-968-4097 FAX: 042-968-4098

受付時間: 平日10:00~17:00 (土日祝を除く)



info@mi-light.co.jp